

ウォッシャーディスインフェクター  
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

NO. 00000

|     |                                        |                                               |                                |            |           |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| お客様 | 名称                                     | 徳島文理大学 様                                      | 製造番号                           | 100185     | ご確認<br>中元 |
|     | 住所                                     | 〒770-8055<br>徳島市山城町西浜傍180<br>TEL 088-602-8000 | 納入日                            | 2017年1月27日 |           |
|     | モリタ・営業所・担当・TEL<br>株式会社モリタ 大阪本社営業部 中元 様 |                                               | 納入検査・会社・実施者<br>株式会社 IHIシバウラ 富田 |            |           |

| 項目    | 判定 | 検査項目                 | 項目       | 判定 | 検査項目                |
|-------|----|----------------------|----------|----|---------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認               | 外装・設置    | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内       |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検        |          | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認        |          | ✓  | キズ・汚れ               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認      |          | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷   |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態     | 制御       | ✓  | 運転プログラムの確認          |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付      |          | ✓  | 入力・出力確認             |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ  | 性能評価     | ✓  | インジケータによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認             |          |    |                     |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認         |          |    |                     |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ     | その他      | ✓  | 付属品の確認              |
|       | ✓  | ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ |          | ✓  | 運転説明                |
|       |    |                      |          | ✓  | 装置内運転時異音・振動         |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態          | 運転検査結果   |    | トシ                  |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ         | 良好       |    |                     |
|       | ✓  | 行程表示槽内LEDの点灯         | 設置クリアランス |    |                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ   | 良好       |    |                     |

