

器具除染用洗浄機 IC Washer点検表報告書

お客様	名称	ひらの歯科 様	製造番号	100042	点検実施日	2017. 3. 28	ご承認印	
	住所	高松市木太町 2063-6	運転回数	1049	点検実施者	(株)HIニッポン小山		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者	大阪 佐治様		

ドア機能

- ドア開閉動作・異音
- ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ドア締め付けスイッチの作動
- インターロックの作動
- テンションスプリング及びワイヤの取付け・伸び
- ドアパネルの取付け
- ドアヒンジの作動
- ドア手動開放レバーの作動
- ドア開放ボタンによるドア開放量(100mm以内)

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- 薬剤レベルセンサーの配線・コネクタ、配管取付
- 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ローラーポンプの作動
- 薬剤投入量(50mL計測)
- 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取付け
- 乾燥ファンの作動・異音
- 乾燥ヒータの取付け・配線の劣化
- 乾燥ヒータの作動
- プレフィルタのつまり・汚れ
- HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 給水弁の作動・漏れ
- 給湯弁の作動・漏れ
- 水位圧カススイッチの作動・漏れ
- 循環水圧カススイッチの作動・漏れ
- 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け・漏れ
- 循環ポンプの作動・異音
- 防振ゴムの取り付け・劣化
- 排水ポンプの取り付け・漏れ
- 排水ポンプの作動・異音
- 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- 槽内LEDの点灯
- 洗浄アームの回転
- 洗浄アームの変形・損傷・つまり、樹脂部品の摩耗
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動
- タッチパネルの色あせ・表示・汚れ・損傷
- 電源スイッチの作動
- 電源コード・プラグの損傷・よれ
- 各基板のコネクタの緩み
- 各コネクタの緩み・各端子の抜け
- 各配線の変色・損傷・結束
- ヒーター配線の緩み・損傷・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体とドアの位置関係
- アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- 外装の汚れ・損傷
- 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ドアパッキン(1年毎)
- プレフィルタ(2年毎)
- HEPAフィルタ(2年毎)
- 洗剤・仕上剤ポンプチューブ(1年毎)

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
◎	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
洗剤ホース7042-7	1
仕上ホース7042-7	1
ドアパッキン	1