

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様 印	店名	山田 歯科	電話番号	1406 0085	点検実施日	2017 7/13	二重 印	山田
	住所	国山県	点検時間		点検実施者	エム・エス・エス 木下		
	納入場所	診療室	サービス担当者	定期・保守・フルメンテ	モリタ検査部	矢野		

ドア機構

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバックシン目視点検
- ☒ ドアフックの締め付け・締め付け確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ動作確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・傷び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・錆び等の点検
- ☒ ポンプチューブの置れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの動作確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの動作状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の動作状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の動作状態・漏れ
- ☒ R〇水弁の動作状態・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給湯タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の動作状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの動作状態・異音
- ☒ 防護ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの動作状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ブラックラバーゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・つまり
- ☒ 加熱ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター温度防止部の取り付け状態・汚れ

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子確認
- ☒ 端子の腐み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の重さ・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の腐み・変色有無(加熱・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準値以内
- ☒ アジャスタフットの腐み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアバックシンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる精度判定(TDS)

点検事項

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗浄ポンプ	1
洗浄ポンプ+2=7 27	2
洗浄ポンプ+ホース 送付済	2

株式会社HIMEDY
 機械事業本部営業部 営業サービス課
 〒702-8122 岡山県岡山市東区西大井町 70-6
 TEL 085-944-6528 FAX085-942-9030