

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

名称	ほくむの郷歯科	製造番号	14070122	点検実施日	2018.3.30	二重封印	尾田 浩之	
	住所	石川県金沢市田上さくら1丁目5	電話番号	1867	点検実施者			木下、川村
	納入場所		サービス形態	点検	モリタ検査部			矢野

計装(安全)

- 圧力計0点指示検査
- ドア
  - フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
  - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
  - フック取付け状態・動作確認
  - フックパネ・フック緩衝ピンの取り付け状態
  - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
  - ドアカバーの取り付け状態・割れ
  - フック検出ユニット動作確認
  - ドアロックユニット動作確認
  - 蓋板のキズ・汚れ
  - 開閉ハンドルの損傷確認
- 筒体
  - 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
  - 減菌温度センサの汚れ
  - 鏡カゴの破損・汚れ
  - 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
  - フッ素樹脂チューブ・絶手の損傷・漏れ
  - シリコンチューブ・絶手の損傷・漏れ
  - 給気弁の動作状態・漏れ
  - 排気弁の動作状態・漏れ
  - 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ
  - 減菌弁の動作状態・漏れ(3方弁)
  - ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)
  - ストレーナーの汚れ
  - 給水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
  - 安全弁(減菌室)の漏れ
  - 真空弁(真空発生器)の漏れ
  - ダンプナーの漏れ・閉鎖割れ
  - 大気圧検知圧カススイッチの動作状態・漏れ
  - ラジエーターの取り付け状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の变色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力の確認
- ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準値内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルターのおまり・汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運送確認	
○	□

真空発生器

- ソケット絶縁液割れ・漏れ
- フラジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異音等の確認
- 真空到達度 ~ 88

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-844-8528

FAX:086-842-9030