

ic c/ave IM-302

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

お客様 お名様	名称	稲田産科医院	製造番号	100236	点検実施日	2017.12.5	ご承認印 
	住所	富山県富山市新富田22-8	点検回数	1104	点検実施者	エムシー・ドス木下	
	納入場所	診察室	サービス形態	保守点検	モリタ富山営業	本社営業部	

計装(安全)

- ☐ 圧力計の点検承認
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - ☒ フック取付け状態・動作確認
 - ☒ フックパネ・フック線巻ビンの取り付け状態
 - ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット動作確認
 - ☒ ドアロックユニット動作確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ
 - ☒ 開閉ハンドルの損傷確認
- 台体
- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - ☒ 減速温度センサの汚れ
 - ☒ 鋼カゴの破損・汚れ
 - ☒ 台内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
- ☒ フッ素樹脂チューブ・絶手の損傷・漏れ
 - ☒ シリコンチューブ・絶手の損傷・漏れ
 - ☒ 融気弁の作動状態・漏れ
 - ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
 - ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
 - ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ☒ ストレーナーの汚れ
 - ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
 - ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
 - ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 - ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
 - ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
 - ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 溢流弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの損傷確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準線き内
- ☒ アジャスタットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試験運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☐ ケミカルインジケータによる判定
- ☐ リークチェック
- ☐ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

合 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-844-6328

FAX:086-842-9030