

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 6月 12日

機種/型式	ワスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018年 5月 17日	作業時間:	Hr
顧客名	くに歯科クリニック 様	TEL:	076-234-9222
所在地	石川県金沢市田上の里2丁目-149番地	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 大阪本社	ご担当	矢野 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 100280	運転回数: 140回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー-No.11 蒸気発生器高温異常		
原因		
蒸気発生器内の温度が規定値よりも高温を示したことで、エラー表示が出た。		
工場にて運転を止めたが、全て規定範囲内に収まっています。		
処置、作業内容		
蒸気発生器温度センサーを交換した。		
特記事項		
 BMS-Test STEAM コンパクトPCD(デジタルモード): OK.		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			医務済人社団		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

くに歯科クリニック
〒920-1158 石川県金沢市田上の里2丁目149番地
TEL 076-234-9222 FAX 076-234-9227
ご署名 <http://kuni-sika.com>

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者