

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 6月 12日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018年 5月 15日		作業時間: Hr
顧客名	稲田歯科医院	様	TEL: 076-441-2348
所在地	富山県富山市新富町 2-2-8		ご担当: 様
販売店	株式会社モリタ 大阪本社		ご担当: 矢野 様
納入年月日	2017年 4月 7日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品: 様
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100236	運転回数: 927回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
I7- No. 30 圧内高圧異常		
原因		
134℃滅菌時の圧力が規定値(約210kPa)を超えたため。 I7- 発報モードに。		
処置、作業内容		
圧力センサーの交換をお願いしました。		
特記事項		
ソフトウェアPCディエロー(デジタルモード): OK		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

富山県富山市新富町2-2-8
医療法人社団
稲田歯科医院
理事長 稲田次郎 印
(076)441-2348
ご署名
責任技術者 作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030