

D 作業報告書

取得様	カサブランカーニフルクリニック様			ご承認印
住所	大阪狭山市東栗本4-42-1			
TEL	072-367-4112	室名		様
機種型式	BC-17	号機	運転回数	470 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	株 IHI シバウラ 様		ご担当者	安田 様

ご依頼内容・現象
定期点検

原因

処置
点検表に基づく点検
ドアパッチを交換 1本
2/8 84088

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
☐ 異常なし ☐ 警報・Er	☐ 異常あり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり	
部位	

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし 点検表

作業日 20 16 年 3 月 14 日

保守状態	1 保守契約	2 性検整備	3 性検点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460	ドアパッキン	1		4600

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	21000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	1 名× 100 円× 92km	9200
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	高運代		2560

サービスセンター	大阪	実施者	安田
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理 No. 775402

②作業日 20 16 03 04

③Uコード 0723874182

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 13090019

⑦保守・サービス形態 作業区分 9-2-40

⑧故障コード 01 - 999 - A

⑨実施SC 64

⑩技術者 47

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 4600
⑭B	技術料等 32760
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 37360
⑱	消費税 2988
ご請求金額 ¥ 40348	
納品書 No. 9855	

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様	名称	カサブランカデンタルクリニック 様	製造番号	13090019	点検実施日	2016年3月4日	ご承認印 
	住所	大阪府大阪狭山市菜葉木4-429-1	運転時間	470	点検実施者	エムシーサービス(株)黒田	
	納入場所		サービス形態	二年点検	モリタ担当部署	大阪本社営業部	

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
エアーフィルター	



株式会社HISHIHARA

機械事業本部営業部 営業サービスG

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030