

クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名称	千里ペリオインプラントセンター 様	製造番号	14080166	点検実施日	2016年3月29日	ご承認印	
	住所	豊中市新千里東町1-4-2 ライフサイエンスビル11F	運転時間	25-3 回	点検実施者	エムシーサービス(株)黒田		
	納入場所		サービス形態	1年点検	モリタ担当部署	大阪本社営業部		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☐
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

運転確認

合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	/
エアーフィルター	

株式会社HIメジセイキ

機械事業本部営業部 営業サービスG
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6628 FAX 086-942-9030

D 作業報告書

お得意様	成和歯科診療所			様	ご承認印
住所	〒260-0823 千葉県千葉市中央区新大塚1-1-1 成和				
TEL	06-8823-2311	室名		依頼	様
機種型式	BC-17		号機	253	回
完了	継続	有料	無料	製番	14080166
取扱業者名	株ノITI-エスピー		様	ご担当者	中澤 様

ご依頼内容・現象

一点検

原因

処置

点検表に基づき点検作業

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣りの機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 3 月 29 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守内容	3 CM	医療機器		特 非 特 管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

特記事項

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

001-0046-0	ドリアンキニ	1		4600

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No. 6600)
2	技術料	H× 名× 円 16400
3	派遣料	名× 100 円 × 18km 1800
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	駐車代 200
6		

サービスセンター	大塚	実施者	黒田
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
黒田	小林	佐藤	久保

①管理 No.	775419
②作業日	20 16 03 29
③Uコード	0668232311
④⑤機種コード	11 - 00
⑥製造 No.	14080166
⑦保守・サービス形態	3-2-40
⑧故障コード	01-999-A
⑨実施SC	64
⑩技術者	42
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料金内訳

⑬A	部品代	4600
⑭B	技術料等	18100
⑮		
⑯	税別合計金額	23700
B	消費税	1096

ご請求金額 ¥ 25596

納品書 No. 10678