



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺1-10-10

TEL 086-944-8528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	歯科並木町斎藤クリニック	製造番号	100320	〒720-0928 石川県金沢市並木町2-10 浅の川ハイム1F 歯科 並木町 斎藤クリニック 斎藤 雅 司 TEL 076-232-0820
	住所	石川県金沢市並木町2-10	納入検査実施日	H30.4.9	
		浅野川ハイム101	納入検査実施者	エムシーサービス金沢本下	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	Ⓐ	ハンドル開閉検出確認	電装系	Ⓐ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	Ⓐ	ドアロックユニット作動確認		Ⓐ	ディスプレイの色あせ・表示確認
	Ⓐ	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		Ⓐ	電源スイッチの作動状態
	Ⓐ	ハンドルキズ・汚れ		Ⓐ	SDカードの挿入・取外性
缶体	Ⓐ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	Ⓐ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	Ⓐ	滅菌温度センサの汚れ		Ⓐ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	Ⓐ	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		Ⓐ	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	Ⓐ	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		Ⓐ	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	Ⓐ	給水タンクの内部汚れ	制御	Ⓐ	キズ・汚れ
	Ⓐ	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		Ⓐ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	Ⓐ	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		Ⓐ	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	Ⓐ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		Ⓐ	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	Ⓐ	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	Ⓐ	B&Dテスト実施
	Ⓐ	タンク内に汚れはないか		Ⓐ	リークチェックテスト
	Ⓐ	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		Ⓐ	0点調整
	Ⓐ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		Ⓐ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	Ⓐ	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	Ⓐ	運転・お手入れ方法の説明
				Ⓐ	装置内運転時異音

特記事項