

点検・修理報告書

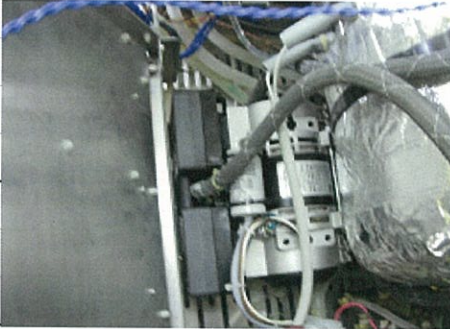
管理 No. 20181015
発行日: 年 月 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2018 年 8 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	コープ大阪病院 様		TEL: 06-6914-1100
所在地	大阪府大阪市鶴見区鶴見 3-6-22		ご担当 様
販売店	モリタ大阪本社		ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090181	運転回数: ###
------	----------------	-----------

不具合状況、依頼内容、異常履歴
エラー 30: 乾燥時真空エラー

原因	空ポンプのダイヤフラムの劣化による高温時に真空ポンプの真空引きが鈍くなり排蒸・乾燥時に真空エラーが起こる。 劣化の想定原因は、ハンドピースのオイル・水に含まれている不純物・がかんがえられます。
----	---

処置、作業内容		給水タンク・排水タンクの清掃を行い 真空ポンプを交換いたしました。
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者