

点検・修理報告書

管理 No. 20180801
発行日: 2018年 10月 26日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 10 月 3 日		作業時間: Hr
顧客名	はびねす歯科石橋駅前クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府池田市石橋1-13-1-2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080075	運転回数: 2820
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 3 漏洩検知		
原因		
給水電磁弁から水が滴り落ちて、装置内部に溜まったため		
処置、作業内容		
給水電磁弁に詰まったゴミを除去		
特記事項		
洗浄槽内フィルターの定期的な清掃をお願いします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

はびねす歯科石橋駅前クリニック 日
〒563-0032 大阪府池田市石橋1-13-1 2F
TEL 072-762-4618 FAX 072-762-4619 印

修理業者 株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	安田

《不具合対応報告書》

担当者: 小山 貴之

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2018 年 10 月 26 日
【連絡元】 ☒ モリタ (担当者:)
 ☐ ユーザー
 ☐ その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 はぴねす 歯科

wb 150

IC Washer【機番: 】

IC Clave【機番: 】

【症状】

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

 《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
 ☐ その他 ()

【給水方法】 ☒ 水

☐ 水 & お湯

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☒ ハンドピース用ラック 吸引管をてのみ。

 《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

 《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】

修理完了 機を返却

【備考】