

IM-302

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

モリタ用
作業用
H-Iアグリテック用

お客様 お印	名称	ねばえ歯科	製造番号	14090179	点検実施日	2018.10.18	ご承認印	
	住所	石川県野々市市御経塚3丁目1-40	運転回数	2029	点検実施者	木下 川村		
	納入場所		サービス形態	点検	モリタ検査結果	矢野		

計装(安全)

- ☒ 圧力計の点検指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック線番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
- ☒ フッ素樹脂チューブ・絶手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・絶手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水道コネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基礎傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ 目&Oテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

【 〇 】

合 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は①を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-844-8628

FAX:086-942-9030

④ 作業報告書

起程地	めばえ歯科				様	ご承認印	
住所	石川県						
TEL	0762691180		署名		ご依頼	様	
機種 型式	BC17			号機	運転 回数	2029 回	
完	継続	有	無料	製番	14090179		
取扱業者名					ご担当者		
IHISケリラ..17					様	様	

依頼内容・現象	定期点検
原因	
処置	同上 内容は別紙点検表記入提出し封

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	席の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし	☐ 静寂・Rr
	☐ 漏れあり	☐ 異音あり
	☐ 破損あり	☐ 劣化あり
	部位	
☐ 同紙添付	☐ あり	☐ なし

作業日 20 年 月 日

保形	守	1 守契約	2 性能整備	3 検点整備	4 点検整備	5 点検	9 計外	(摘要)
	保							
サイ	保	1 保守期間	2 ポスト	3 CM	医療機器	3	区分	特許
	ビ							
作	保	00 製品販売	10 納入設置	11 寿命	20 定期点検	30 性能検査	40 交換	50 コール
	区							
業	分	70 PR	72 取扱い	73 改造	74 部品入れ	75 下見	77 FC	80 アター
分								90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・振付・点検・性検・	(見積書No.)	16400
2	技術料	日× 名× 円	
3	派遣料	20KX 1名× 100円	2000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サ ー ビ ス ミ ニ ス タ ー	金沢SC TEL	実施者 木下川村	部署長 	検印	入力	納品書
---	-------------	-------------	--	----	----	-----

メモ

特記事項

①管理 № 800481

②作業日 20 18/10/18

③Uコード 0762691100

④設備コード 11 - 09

⑤製造 № 14090179

⑥保守・サービス形態
作業区分 5 - 2 - 40

⑦故障コード □ - □ - □
□ - □ - □

⑧実施 SC 61

⑨技術者 20

⑩同行応援 28, □, □

⑪原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

部品代 4600

技術料等	18400
------	-------

13				
----	--	--	--	--

税別合計金額	23 000
--------	--------

消費税	1840
-----	------

ご請求金額 ¥	24840
---------	-------

納品書№	
------	--

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは右上の管理No.にてお願いします。

D 实施者→经理→请求