

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIAグリテック用

お客様	名称	山田歯科	製造番号	14060085	点検実施日	
	住所	富山県	運転回数	14080134	点検実施者	山田 雅敏
	納入場所	診療室	サービス形態	定期保守・フルメン	モリタ担当部署	矢野

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☐ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

☒ 是 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
エアフィルター プレフィルタ	1枚
洗剤ポンプチューブ	2
扉パッキン 上・下 各一本	2本

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

D 作業報告書

お得意様	山田 苗矢		様	ご承認印	
住所	富山県				
TEL		室名		ご依頼	様
機種型式	WD-150ミット洗淨器		号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	14080134
取扱業者名	IHエアクリーナ		様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象	定期保守点検 二年目作業
原因	
処置	同上 内容は別紙点検表記入提出します

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言 おまけにアース線も見てあげます。	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 11 月 29 日

保守形態	1 保守契約	2 性整備	3 性点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要√)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00202300	エアフィルタ-2ツレ	2	520	1040
T00202460	" Xイン	1	14700	14700
T00203190	洗滌ポンプホース	2	1400	2800
T00201100	解パツフェン	1	1050	1050
T00201120	" 下	1	790	790

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	12150
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	1400X 1名× 100 円	14000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サ ビ ン セ ン タ ー	金沢SC	実 施 者	木下
TEL	-		

メモ
特記事項

①管理 No.	800409
②作業日	20 18 11
③Uコード	07648701
④⑤機種コード	11 -
⑥製造 No.	14060085
⑦保守・サービス形態	5 - 1 -
⑧故障コード	- - -
⑨実施SC	61
⑩技術者	20
⑪同行・応援	- - -
⑫原因・処理	9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳	
⑬ A	
部品代	2030
⑭ B	
技術料等	2615
⑮	
⑯	
税別合計金額	4650
消費 税	370

ご請求金額 ¥	502
納 品 書 No.	