

点検・修理報告書

管理 No. 20180828

発行日：2018 年 10 月 3 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 3 月 3 日		作業時間： Hr
顧客名	古市歯科医院 様	TEL：	
所在地	香川県高松市多賀町3-12	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 2 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090014	運転回数： 2354回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
電源が入らない。機器内漏水		
原因 排水センサーブロックより水が漏れた跡がありその下部に予備電源がありそこに水がたれてショートしたと思われます。		
処置、作業内容		
定期交換部品交換		
薬剤のケーブルを交換		
排水センサーブロック交換		
特記事項機器内のフィルターの清掃をお願いします		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 11 月 7 日

ご署名

古市貴暢



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

安田

《不具合対応報告書》

担当者: 小山 貴之

修理完了機の返却で
対応

代替機
WD-150

【発生日】 2018 年 11 月 7 日
【対応日】 年 月 日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☒ユーザー
☐その他()
【ユーザー名&県名】 吉市歯科医院 香川

IC Washer【機番: 】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー3 機器内漏水

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☒水

☐水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

水のり
1日2回運転

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】