

点検・修理報告書

管理 No. 2019305

発行日: 2019 年 3 月 7 日

機種/型式	高圧蒸気滅菌器 BC-17		
作業年月日	2019 年 3 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	サンスター歯科診療所 様		TEL:
所在地	大阪府豊中市新千里東町1-1-3 SENRITよみうり3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張 ☒ 引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090195	運転回数:
------	----------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 87 蒸気発生器圧力過昇・・・電磁弁の動作不良及びチューブの破損等で発生するエラーです。

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。故障状況は下記の通りです。

①安全弁入口側のチューブが損傷していました。

②給水経路にゴミが詰まっていた。

処置、作業内容

漏れ箇所を特定し、損傷したチューブを交換しました。(写真1)

給水タンクホルダ～給水ポンプ系統を分解清掃しました。(写真2、3)

機械内部にホコリが堆積していたので清掃しました。

写真1



写真2


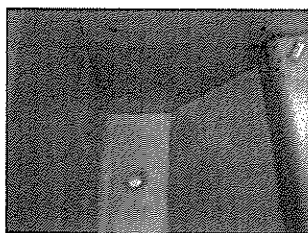


写真3

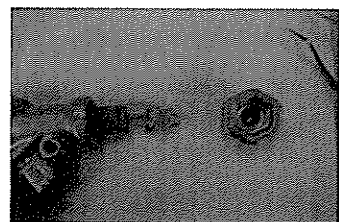

故障を未然に防ぐために、定期的に給水タンク、給水フィルターおよびその周辺の清掃をお願い致します。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管チューブ		1 式		
2					
3					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 8 日

ご署名

福地 2 氏

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

