

点検・修理報告書

管理 No. 20181207

発行日: 2018 年 12 月 17 日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2018 年 12 月 7 日			作業時間:	4 Hr
顧客名	ひらの歯科 様			TEL:	
所在地	香川県高松市木太町2063-6			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015 年 11 月 11 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100042	運転回数:	2198	ツチハ® Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
① 本体内部より異臭					
原因					
① 乾燥空気ラインジョイント亀裂による水漏れ					
処置、作業内容					
① 乾燥空気ラインジョイント交換					
特記事項					
洗浄層内部のストレーナーの目つまり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります					
ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	L型ジョイント		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			ご署名		
			印		
			院長 比良野 哲彦		
			〒760-0080 高松市木太町2063-6		
			TEL 087-812-6480		
			FAX 087-812-6481		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

環サ
'18/12/17
富田

環サ
'18/12/17
桐野