

点検・修理報告書

管理 No. 20181208
発行日: 2019 年 2 月 12 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2019 年 2 月 12 日		作業時間: / Hr
顧客名	ひらの 歯科	様	TEL:
所在地	香川県高松市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100082	運転回数: 117 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
槽内温度低下 1			
原因			
フィルター③の目詰りにより 槽内温度センサーに水が当たっている為			
処置、作業内容			
フィルター③の清掃 加温限度時間を「500秒」に変更			
特記事項			
様子見て使用して下さい。 総 23/8 回			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ひらの 歯科
院長 比良野 哲彦
〒760-0080 高松市木太町2063-6
TEL 087-812-6480 印
ご署名 FAX 087-812-6481

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
田	ハ