

|      |      |                  |        |             |           |               |      |                                                                                     |
|------|------|------------------|--------|-------------|-----------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様様 | 名称   | まとは歯科医院          | 製造番号   | 13100057    | 点検<br>実施日 | 2019-12-5     | ご承認印 |  |
|      | 住所   | 大阪府豊中市庄内東町1-7-13 | 運転回数   | 1097 / 3035 | 点検<br>実施者 | HI 77リテ、7 小 山 |      |                                                                                     |
|      | 納入場所 |                  | サービス形態 |             | モリタ担当部署   |               |      |                                                                                     |

## 計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

|   |                |
|---|----------------|
| ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| ✓ | 滅菌温度センサの汚れ     |
| ✓ | 網カゴの破損、汚れ      |
| ✓ | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ |

## 配管系

- ☒ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認  
☒ 真空到達度

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ  
☒ 下部給水弁の漏れ  
☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ  
☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ  
☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

## 外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 運転プログラムの確認          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 入力・出力確認             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 試運転プログラムの実行・異常動作の有無 |

**消耗品**

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ  
☒ エアークリナーのつまり、汚れ

### 性能評價

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | B & Dテスト実施          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ケミカルインジケーターによる判定    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | リークチェック             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | キャリブレーションの実施(温度・圧力) |

インジケータ貼り付け

|      |   |
|------|---|
| 運転確認 |   |
| 合    | 否 |

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

[illegible]

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030