

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

電リタ用
付属品用
IHIアグリテック用

お客様 お名	名称	品番	点検実施日	ご承認印	氏名
	住所	運転回数	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ監査部署		
	歯科はくくみの郷	14070122	2020.6.15		
	石川県金沢市田上55-151	170	エムシーサービス 川村		
		点検	矢野		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示確認
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック緩衝ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ボローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 裏板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレナーの損傷・汚れ
- 配管系
- ☒ フッ素樹脂チューブ・絶手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・絶手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の動作状態・漏れ
- ☒ 排菌弁の動作状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの動作状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 圧気防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの動作状態・漏れ・異常
- ☒ 逆戻弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

電線系

- ☒ タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの動作状態
- ☒ 付随表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接触確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの高圧(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認

☒ 是	☐ 否
---------------------------------------	----------------------------

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-8528

FAX:086-942-9030