

点検・修理報告書

管理 No. 19412
発行日: 2020年 6月 5日

		ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2020年6月30日			作業時間:	16 Hr
顧客名	よしみファミリー歯科 様			TEL:	
所在地	大阪市都島区友渕町2-12-21			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2018 年 5 月 1 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号:	100317	運転回数:	1494回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・ ドアが開かない。タッチパネルが真っ暗なため、開くボタンを押せない。					
・ エラー 1 6 槽内温度異常が発生した。					
・ エラー 1 0 ドア開放異常が発生した。					
原因					
・ タッチパネルの裏側（基板）に水がかかり、ショートしておりました。					
上のテーブルから水がこぼれた可能性があります。					
・ 温度センサに水が当たっていなかった可能性が高いと考えています。					
・ ドアロック機構の調整がずれておりました。					
処置、作業内容					
・ タッチパネルを新品交換いたしました。					
・ 設置時にジョイントゴムの状態や器材の置き方を確認させてください。					
・ ドアロック機構を調整いたしました。					
特記事項					
・ 洗剤、仕上剤のコネクタに劣化が見られたので、交換させていただきました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タッチパネル		1		
2	洗剤用コネクタ		1		
3	仕上げ材用コネクタ		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
お客様ご確認署名欄					
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2020 年 7 月 10 日		
			ご署名 		
修理業者	株式会社IHIアグリテック		品証	責任技術者	作業者
	岡山県岡山市東区西大寺新地170-6		品証	サービス	サービス
	TEL: 086-944-6528		'20/06/30	'20/06/30	'20/06/30
	FAX: 086-942-9030		菊池	富田	佐藤