

点検・修理報告書

管理 No. 20551
発行日: 2020/11/29

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2020年11月16日			作業時間:	8 Hr
顧客名	はつおか歯科 様			TEL:	
所在地				ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号:	100162	運転回数:	1602回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・洗剤使用量が多い。					
原因					
・洗剤のDPIチューブが劣化しておりました。					
処置、作業内容					
・DPIチューブを新品交換いたしました。					
特記事項					
・緊急時ドア開放のためのスリットから水が浸入し、ドアロック機構が錆びておりました。上部台から水がたれたと考えられます。浸水防止用の蓋をご用意しましたので、お使いください。錆びた部品は一式交換しました。					
・循環ポンプのゴム配管が劣化しておりましたので、新品交換いたしました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	DPIチューブ		1		
2	ドアロック機構		1		
3	ゴムC		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2020年 12月 5日		
			ご署名 印		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20/11/29	20/11/29	20/11/29