

点検・修理報告書

管理 No. 19245

発行日: 2020/6/8

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2020 年 6 月 3 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	かわさき歯科医院 様	TEL:	
所在地	大阪府寝屋川市東大和町11-4	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100038	運転回数: 4347回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 8 循環水圧低下		
原因		
・凝縮タンクに洗浄水が多く流れすぎて槽内のお湯が排水されたのが原因と推測されます。		
・中段ラックのジョイント部からの漏れが確認できました。		
処置、作業内容		
・凝縮タンク入り口に仕切り版を取り付けました。		
特記事項		
・中断ラックのジョイントゴムは、設置時に交換させていただきます。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ジョイントゴム		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 6 月 21 日

医療法人 葛会 かわさき歯科医院

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/06/08 菊池	サービスG '20/06/08 富田	サービスG '20/06/08 安田