

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様用

お客様	名称 カサブランカデンタルクリニック	製造番号 13090016	点検実施日 2021/2/15	し承認印 
	住所 大阪府大阪狭山市茶屋木4-429-1	運転回数 2058	点検実施者 IHIアグリテックサービス	
	納入場所 同上	サービス形態	モリタ担当部署	

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検(点検交換)
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ (点検交換)
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ(点検交換)
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)(点検交換)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ(現地設置)
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ (現地設置)
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ(現地設置)
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ(現地設置)
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内(現地設置)
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態(現地設置)
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

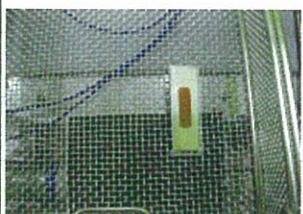
- | | |
|---|------|
| ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ | 点検交換 |
| ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ | 点検交換 |
| ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ | 点検交換 |
| ☒ 洗剤ポンプチューブ | 点検交換 |

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗剤チューブ・ドアパッキン・プレフィルター・HEPAフィルタ	一式
 	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2021 年 2 月 15 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 2 月 15 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	カサブランカデンタルクリニック 様		TEL：
所在地	大阪府大阪狭山市菜葉木 4-4 2 9		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 2 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090015	運転回数： 2058
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー3 機器内漏水		
原因		
・排水センサーブロック部より水漏れ		
・漏水センサーの固定用両面テープが漏れた水で膨潤してしまい誤作動		
・洗剤ジャック破損		
処置、作業内容		
・センサーブロック交換		
・漏水センサー交換		
・洗剤ジャック交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	センサーブロック		1		
2	漏水センサー		1		
3	洗剤ジャック		一式		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 29 日

ご署名 阿部 一太



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービスG '21/02/19 富田	環境PJサービスG '21/02/15 安田