

点検・修理報告書

管理 No. 20161
発行日: 2020/12/16

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2020年12月14日		作業時間: 8 Hr
顧客名	うえだ歯科クリニック 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100052	運転回数: 2508回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが反応しない。
(開を押しても扉が開かない。)

原因

・このタッチパネルは感圧式です。感圧式タッチパネルは、感圧部に繰り返しストレスを受けると、感圧位置がずれる場合があります。
・今回の不具合は、繰り返しストレスが原因と考えられます。

処置、作業内容

・タッチパネルを新品交換いたしました。

特記事項

・乾燥ヒータが劣化しておりましたので、交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥ヒーター		2		
2	タッチパネル		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 12 月 17 日

ご署名 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		