

D 作業報告書

得意	トータルヘルスケア様		ご承認印
住所	大阪市		
TEL	06-694-1100	署名	薬科
機種名	ボトジL-7		メーカー
型式	BC-17	(号機)	製造
完	継続	有料	無料
			運送回数

ご依頼内容・現象	
定期保守点検	
原因	(ご依頼者 様)
処置	
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい) ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい) ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし	

お客様への伝言

作業日 20 21 年 1 月 14 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 本機	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特	7 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
700/00460	トータルヘルス	1	4600	4600
700/02600	ボトジL-7	1	6200	6200

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No.)	20000
2	技術料	20000	20000
3	派遣料	名× 100 円 × 35 人	4500
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6	高圧代 1600 円 代 3000 円		2500

サニセーター	大阪	実施者	黒田
TEL			

責任技術者	検印	人力	納品書

取扱業者 (請求先)
 (株) IHL アソシエーツ
 (支店名)
 (ご担当者) 桑原 様
 (注文No.)

特記事項

①管理 No. 827662
 ②作業日 20 21 年 1 月 14 日
 ③Uコード 066914100
 ④機種コード 11 - 71
 ⑤製造 No. 14080181
 ⑥保守・サービス形態 5-2-20
 ⑦故障コード 01 - 888 - A
 ⑧実施SC 64
 ⑨技術者 47
 ⑩同行応援
 ⑪原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬ A	部品代	10800
⑭ B	技術料等	30000
⑮		
⑯	税別合計金額	40800
	消費税	4080
	ご請求金額 ¥	44880

納品書 No.

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書		製造番号 14090181		点検実施日 2021年1月14日	承認印 
名称 コーブおおさか病院		株	点検実施者 イムサービス 黒田		
住所 大阪府大阪市鶴見区3-6-22		送転回数 1359/5448	モリタ担当部署		
納入場所 菌科		サービス部署	定期保守点検		

計画(安全)	✓	圧力計0点指示器点検
ドア		
✓	✓	フック後出スウィッチの取り付け状態・動作確認
✓	✓	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
✓	✓	フック取付け状態・動作確認
✓	✓	フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
✓	✓	ピストン・ホローセッティング締め
✓	✓	ドアカバの取り付け状態・割れ
✓	✓	フック後出ユニット動作確認
✓	✓	ドアロックユニット動作確認
✓	✓	基板のキズ・汚れ
✓	✓	開閉ハンドルの損傷確認
缶		
✓	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
✓	✓	減菌温度センサーの汚れ
✓	✓	網カゴの破損・汚れ
✓	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
✓	電源スイッチの作動状態
✓	行程表示LEDの点灯
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
✓	各基板のコネクタ・緩み・確認
✓	端子の緩み・コネクタの接続確認
✓	配線の変色・損傷有無・結束状態
✓	圧力センサーの取付け状態・入力確認
✓	ヒーター配線の緩み・変色有無(ポイラー乾燥機)
	外装・設置
✓	本体の水平確認・基準傾き内
✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
✓	キズ・汚れ
✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

配管系	フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、濡れ	破損、破漏
✓	シリコンチューブ・継手の損傷、濡れ	
✓	給気弁の作動状態、濡れ	
✓	排蒸弁の作動状態、濡れ	
✓	真空・乾燥弁の作動状態、濡れ	
✓	送液弁の作動状態、濡れ(3方弁)	
✓	ドレン弁の作動状態、濡れ(3方弁)	
✓	ストレーナーの汚れ	
✓	排水・給水タンク水抜きコネクタの濡れ、破損	
✓	安全弁(減圧室)の濡れ	
✓	安全弁(蒸気発生器)の濡れ	
✓	ダンパーの濡れ、溶接割れ	
✓	大気圧検知圧力スイッチの作動状態、濡れ	
✓	ラジエーターの取り付け状態、濡れ	

☒	運転プログラムの確認
☒	入力・出力確認
☒	運転プログラムの実行・異常動作の有無
消耗品	
☒	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒	エアフィルターをつまみ、汚れ
性能評価	
☒	B&Dテスト実施
☒	ケミカルインジェクターによる判定
☒	リークチェック
☒	キャブプレージョンの実施(温度、圧力)

【インジケータ貼り付け】

建設施設	否
------	---

※点校の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
D7ハッペン	1
給水栓=7 葦	1
-8.5kPa - 2M . -90kPa - 3m/s	

☒	ソケット他溶接漏れ・漏れ
☒	フランジパッキン漏れ
☒	ヒーター取り付け状態・漏れ
☒	空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
☒	電機ポンプの作動状態・異常・漏れ
☒	逆止弁の作動状態・漏れ
真鍮ポンプ	
☒	水漏れ・異常音の確認
☒	真鍮到達度
給水タンク	
☒	給水タンクの損傷・漏れ
☒	下部給水弁の漏れ
☒	蓋・取っ手の損傷・割れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ
排水タンク	
☒	タンクの汚れ・漏れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

株式会社HIIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030