

④ 作業報告書

指 標	成和歯科診療所				様	ご 承 認 印	
住所	豊中市				印		
TEL	06-6813 2311		室名				
機種名	1752B A-17C-7				メーカー		
型式	BC-17 (号機)				製番	14080/66	
完了	継続	(有料)	無料	運送回収	1043 回		

ご依頼内容・現象 (ご依頼者 様)	
原 因	
処 置 ☒ 部品交換 (右記部品・覧を参照して下さい) ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい) ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし	
・ BC-17 定期保守点検	
・ ドアパネル交換	
・ 給水口：ワキ、フタ交換	

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 サ一 ス形 作業 区分	守 願	1 保 守 約	2 換 性 態	3 換 性 態	4 換 性 態	5 点 検	9 対 象 外	(摘要✓)	
	1 保 守 期	2 ス ト ク	3 CM	医 療 機 器			区 分	特 許	非 特 許
	00 盤 品 売	10 納 入 置	11 現 地 調 査	20 定 期 点 検	30 性 能 査 査	40 点 検	50 コ ル	60 撤 去 移	
	70 PR	72 取 扱 説 明	73 改 造	74 部 品 入 替	75 下 見	77 FC	80 ア フ ター	90 そ の 他	

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付点検・性検・ (見積書No.)	16,000
2	技術料 H × 名 × 円	20,000
3	派遣料 名 × 100 円 × 18 km	1,800
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費・駐更代	4,000
6		

サービスセンター	大阪	実施者	王井
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書
			

取扱業者（請求先）

(株)IHI アグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No. 827706

②作業日 20 2/10/208

③Uコード 0668732311

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No. 14080166

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 40

⑧故障コード 01 - 999 - A

⑨実施SC 64

⑩技術者 71

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

⑬ A

部品代	10,800
-----	--------

④ B

技術料等	25,800
	17,000

15

[illegible]

16

税別合計金額	36,600
--------	--------

--	--

消費税

ご請求金額 ￥	40,260
---------	--------

納品書No.	
--------	--

クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

IM-302

名称	成和歯科診療所		製造番号	14080166	点検実施日	2021.2.8	承認印 中野
住所	豊中市新千里東町1-4-2		検	点検実施者	玉井		
納入場所			運転回数	1025	モニタ異常警報		

計装(安全)

☒ 圧力計0点指示誤差

ドア

- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックハネ・フック感温ピンの取り付け状態
- ☒ ヒス・ナット・ボローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 巻板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減菌温度センサーの汚れ
- ☒ 綿カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の動作状態・漏れ
- ☒ 排気弁の動作状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ
- ☒ 減菌弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの動作状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止蓋・温度センサー取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの動作状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの動作状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの溶接確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥機)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試験運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのおつまり・汚れ
- 性能評価
- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認	合
	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は⑥を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン 交換	1
・給水タンク キャリア 交換	1
真空最大圧力 - 88.4 kPa	

株式会社IHITEC
環境プロジェクト部 サービスグループ

〒700-8400 岡山県岡山市東区西大寺新地700-6
TEL: 086-880-1880 FAX: 086-880-2469