

お客様	名称	西川歯科医院	標	製造番号 14070136	点検実施日 2021年2月1日	ご承認印 田中	田中
	住所	大阪府吹田市千里山西1-40-8		運転回数 316 / 3080	点検実施者 エムシーサービス㈱ 黒田		
	納入場所		サービス形態 定期保守点検	モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☒
- 压力计0点指示误差

ドア

- | | |
|---|-----------------------|
| ✓ | フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認 |
| ✓ | 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認 |
| ✓ | フック取り付け状態・動作確認 |
| ✓ | フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態 |
| ✓ | ビス・ナット・ホーローセツ増し締め |
| ✓ | ドアカバーの取り付け状態・割れ |
| ✓ | フック検出ユニット動作確認 |
| ✓ | ドアロックユニット動作確認 |
| ✓ | 蓋板のキズ・汚れ |
| ✓ | 開閉ハンドルの交換確認 |

缶 体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損、汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジパッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 送支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ 下部給水弁の漏れ
- ✓ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 行程表示LEDの点灯
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無（ボイラー・乾燥）

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

翻 閱

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
☒ エアークリナーのつまり、汚れ

性能評価

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ☐ | B&Dテスト実施 |
| ☒ | ケミカルインジケーターによる判定 |
| ☒ | リークチェック |
| ☐ | キャリブレーションの実施(温度・圧力) |

インジケータ貼り付け

運転確認
合 . 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品（名称・型式）	数量
ドアパッキン	1
-85kPa - 2M J2S	

株式会社IH|アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030