

点検・修理報告書

管理 No. 20762

発行日: 2021/2/26

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年2月26日			作業時間:	8 Hr
顧客名	やぶね歯科クリニック 様			TEL:	
所在地				ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	年	月	日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他	☐	修理表示貼付 ☐
装置情報	製造番号:	100329	運転回数:	1481回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー 7 循環水圧低下異常が発生した。					
原因					
・中段ラックのジョイントゴムのつぶし代が不足しており、リークしておりました。					
処置、作業内容					
・中段ラックを新品交換いたしました。					
特記事項					
・ドアパッキンを新品交換しました。					
・ドアの固さを適正にするために、カム 1, 2 を交換しました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	中段ラック		1		
2	ドアパッキン		1		
3	カム 1		1		
4	カム 2		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2021年 3 月 2 日 菊池 富田 佐藤 印		

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
'21/02/26	'21/02/26	'21/02/26
池	田	藤