

点検・修理報告書

管理 No. 210461
発行日: 2021年9月21日

IC Clave		
作業年月日	2021年9月9日	作業時間: 8 Hr
顧客名	ひらの歯科 様	TEL: 087-812-6480
所在地	香川県高松市木太町2063-6	ご担当 様
販売店	(株)玉井歯科商店 高松店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 11 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

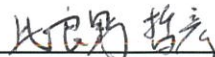
装置情報	製造番号: 100012	運転回数: 9946回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転中に水をこぼしてしまい、停電した。(エラー26)		
原因		
・スイッチング電源に水がかかっておりました。水がかかったことにより、スイッチング電源の基板がショートし、エラー26が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・スイッチング電源を交換しました。		
特記事項		
・蒸気発生器の汚れがひどいため、洗浄しました。蒸気ヒーター、サーモスタット、Oリングは交換しました。		
・缶内フィルターのOリングが劣化しておりましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	スイッチング電源		1		
2	蒸気ヒーター		1		
3	サーモスタット		1		
4	Oリング		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 10 月 4 日

ご署名  

修理業者 株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		