

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

年 月 日

お客様	名称	山田歯科医院	製造番号	14080134	点検実施日	2021.11.4	ご承認
	住所	富山県富山市高内233-2	運転回数	3185	点検実施者	エムシーサービス	
	納入場所		サービス形態	点検	モリタ担当	失野	

山田雅敏

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線・配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ※交換
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン 上・下	1/
DPI 4つ	2
HEPAフィルター	1
入ロフィルター	1
消臭剤	2

株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

業者控用

管理No.	5539	作業日/納入日	2021/11/04(木)	ご依頼日/受付	
お得意様	山田歯科医院			様	ご依頼者
住所	富山県富山市高内227-4			様	室名
TEL	076-467-0195			様	保守契約
実施センター	金沢SC	TEL	076-223-4456	作業者	川村力
同行		同行		同行	
メーカー	IHI 物流産業システム	型式	WD-150-		
機種名	ウォッシャー・イスンフイクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
		製造番号	14080134	運転回数	3185 回
機器2型		機器3型		機器4式	
機器5式		機器6式		機器7式	
作業区分	点検(既存)	完了・継続	完了	継続	有料・無料
請求先	株式会社 IHI 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	定期点検	原因
	エラーNo・コード	

処置	☒ 部品交換	☒ 各部増締	同上 ジョイントゴム劣化の為追加部品交換
	☒ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☒ 設定・PG確認	
	☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
T00201100	扇パッキン	1.00				
T00201120	扇パッキン(下部)	1.00				
T00203190	DPIフィルター ASSY	2.00				
T00202460	HEPAフィルター	1.00				
T00202300	入口フィルター	1.00				
T00201540	ジョイントゴム	2.00				

作業費用	点検料	平日			円	合計	部品合計		円	
	技術料	平日	0.5 H X	1 名 X	円 =		円	作業合計		円
	派遣料	1.0 名 X	円 X	140 km X	1 回 =		円			円
							円			円
	宿泊費		泊 X	名 X	円 =		円			
	諸経費						円			
							円	税別合計金額		円
							円	消費税(10%)		円
							円	ご請求額		円
							円			

お客様への伝言 洗剤ホースの交換が必要です。

作業者	お客様サイン
川村	山田 敬敏

請求先用