

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式			
作業年月日	2021 年 5 月 17 日		作業時間： Hr
顧客名	コープおおさか病院 様		TEL： 06-6914-1100
所在地	大阪府大阪市鶴見区鶴見 3-6-22		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090181	運転回数： 5801
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 30 真空工程中真空エラー		
原因		
・ 給水ポンプフィルターに異物が溜まって供給量が少なくなり、蒸気発生器が高温化し缶内を真空にできな		
・ 真空ポンプの性能低下による真空時間超過		
処置、作業内容		
・ 水ポンプフィルター清掃・給排水タンク清掃		
・ 真空ポンプの性能低下のため交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 16 日

ご署名

林田 亮代

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

環境PJサービスG
'21/05/21
富田

環境PJサービスG
'21/05/21
安田