

お客様	名称	田中歯科医院	製造番号	100219	点検実施日	2021年6月18日	承認印	
	住所	兵庫県尼崎市塚口町4-12-9	運転回数	4586	点検実施者	岩田アグリテック サービスグループ		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当省	モリタ大阪本社		

計裝(安全)

- ☒ 圧力計ゼロ設定
- ドア
- ☒ ブラケットの溶接状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内蓋のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| ✓ | 缶内温度センサの汚れ |
| ✓ | トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ |
| ✓ | 缶内フィルタの損傷・汚れ |

配管系

- ✓ テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の動作確認
- ✓ 排蒸弁の動作確認
- ✓ 真空・排気弁の動作確認
- ✓ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- ✓ 回水弁の動作確認(3方弁)
- ✓ 排水コネクタの漏れ・破損
- ✓ 安全弁(缶内)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ 蒸気発生器からの漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ サーモスタットの設定温度確認
- ✓ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ 蒸気発生器からの漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ サーモスタットの設定温度確認
- ✓ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(Pt)の確認

給水タンク

- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ シリコンチューブの折れ、裂けの確認
- ✓ 差の損傷・割れ
- ✓ フロートセンサー(L)の作動確認
- ✓ フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- ✓ タンクの汚れ・漏れ
- ✓ フロートスイッチの作動確認

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター・接点確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の色変・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ SD基板の腐食の確認

外装・設置

- | | |
|---|-------------------|
| — | 設置場所の水平確認 |
| ✓ | 本体のフロント側が高いことの確認 |
| ✓ | アジャスタの緩み・破損の確認 |
| ✓ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |

制御

- | | |
|---|----------------------------|
| ✓ | 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新 |
| ✓ | SDカードへの書き込みの確認 |

消耗品

- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ エアフィルターのかぶり、汚れ

性能評価

- ✓ B & Dテスト実施
- ✓ コンパクトPCDによる判定
- ✓ TESTバキューム
- ✓ 温度センサーの調整(VR調整)

運輸確認

☒ 合 ☐ 否

インシケータ貼り付け

【 1985-12-1 3734 】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030