

点検・修理報告書

管理 No. 210961
発行日: 2022年1月19日

IC Clave		
作業年月日	2022年1月17日	作業時間: 8 Hr
顧客名	ひらの歯科 様	TEL: 087-812-6480
所在地	香川県高松市木太町2063-6	ご担当 様
販売店	㈱玉井歯科商店 高松店	ご担当 松尾 様
納入年月日	2015 年 11 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100012	運転回数: 10518回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. 「蒸気温度センサー故障」と表示された。		
2. 焦げ臭いにおいがした。		
原因		
・ 蒸気ヒーターの充填剤がとけて焦げ臭いにおいを出していました。		
・ 蒸気ヒーターの異常により蒸気発生器が高温になり、通常より高い温度になったために、「蒸気温度センサー故障」と表示されたと考えられます。		
処置、作業内容		
・ 蒸気ヒーターを交換しました。		
・ 念のため、蒸気温度センサーを交換しました。		
特記事項		
・ 最新の状態にバージョンアップしました。		
・ アジャスターが破損しておりましたので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	蒸気温度センサー		1		
3	アジャスター		2		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 27 日

ご署名



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者