

ふなやま内科

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

若井

点検年月日	H20年 6月 25日	機種名	ONW-10	製造機番	472
設置場所	内視鏡室	TEL			
納入時期	年 月 日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：90.2% 流量：0.95 L/min 圧力：109~181 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☐	調整	☒
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	ワプログラム確認 フタパッキン交換 ・排気ダクト配管、及び 洗浄器内清掃
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名 船山 夏子



※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHインテック
環境事業部

日付: H20 6/24 作業者 若井
ONW-10機番: 472 PSA機番: SPS- 0003 客先: ふじやま内科 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	合
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	合
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	合
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	合
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	合
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	合
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	合
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (90.2 %)	合/否	合
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)	合/否	合
PSA圧力の確認 (109 Mpa) ~ (181 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか 交換	合/否	合
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	合
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	合
ドレンチューブは接続したか	合/否	合
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか 交換	合/否	合
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	合
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	合
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	合
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	合
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	合
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上) インジケータ	合/否	合
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	合
インジケータの変色は良好か	合/否	合

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

・プログラム交換 8→10
・フタパッキン交換 旧式→新式
・オゾンセンサー交換

・排気ダクト内 黒いスラム(多) 清掃
・返品するにんじやないか
・代替機はよかったです