

渡辺医院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者:

点検年月日	平成20年 10月 17日	機種名	ONW-10	製造機番	702
設置場所	武蔵野市 高松本町 4-7-9			TEL	042-220-8888
設置時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源錠	正常 ☐	交換 ☐		
フィルタリセット錠	正常 ☐	交換 ☐		
運転/停止錠	正常 ☐	交換 ☐		
アルコールモード錠	正常 ☐	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☐	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☐	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☐	調整 ☒	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアバージ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水温度	正常 ☐	温度:	mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☐			
酸素発生	正常 ☐	濃度: 22.5%	流量: 2.79 L/min	圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☐	清掃 ☐		
内部	正常 ☐	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☐	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	エア-6使用 2270L/4-30月不換 部品交換
吸着筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	
年 月 日			
ご署名 渡辺			

エア2-2プロサ 冷却コイル 2個の
継手が割れててそこからエアが漏れた。