

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-17652

No. 090106

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	ONW-10
	環営	所在地	神奈川県相模原市橋本 4-18-13	機番	000994
	防品	ユーザー名	中川内科胃腸科クリニック 様	納入日	平成18年5月12日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
		受付日	平成20年12月22日	出荷日	平成21年1月5日
計	3	返送先	納入先と同じ		

修理依頼・苦情内容

エラー11（サーミスタ異常）
定期点検契約ユーザー

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・オゾン分解触媒を加熱するヒーターが故障して規定温度まで上がらない状態でした。
これを温度センサー（サーミスタ）が検知してエラー11を発報しました。
- ・水槽内の上部フィルタが無く、鉗子キャップがサブタンク内に落ちていました。
- ・運転カウンタ：2751回。

[2] 修理・点検内容

- ヒーター交換
- オゾン水濃度測定：0.48～0.64mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：90.7% 酸素流量：0.74 /min 圧力：0.108～0.185Mpa（AC100V、50Hz）
- 蓋ロック調整
- 運転プログラムバージョンアップ。（Ver.8→Ver.10）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

承認



—以上—

交換部品

審査	部品番号	部品名称	数量	備考
		ヒーターASSY	1	
作成				
H21.1.6 中澤				

（株）IHIシバウラ