

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

フの開閉不良、異音確認

点検担当者: 中澤 裕史

点検年月日	平成 21 年 10 月 8 日	機種名	ONW-10	製造機番	001431
設置場所	2F 洗淨室			TEL : 03-3370-5906	
設置時期	平成 19 年 8 月 30 日	使用時間	6468 回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗淨動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗淨 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗淨 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗淨 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度 :	% 流量 :
				L/min 圧力 : 0.183 ~ 0.112 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☐	要 清掃	☐
洗淨コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗淨チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	異音は3台ある水ポンプのうち、 どれかが発生したと思われます。 頻発するようでしたら、 交換をご検討下さい。
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	
スプリング	交換 ☒	4 個	

フの開閉不良について
フアスプリングを全数交換しました。

2009年10月8日

ご署名 上村 守史

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

宛先 久野マインズタワークリニック 上村事務長 様	発信 平成21年 10月 9日 (株) I H I シバウラ (旧社名: 石川島芝浦機械株式会社) 環境事業部 品質保証 G r 中澤一裕 E-mail nakazaw3@ism. ihi. co. jp
写) 宛先	電 話 (086) 944-6528 ファクシミリ (086) 942-9030
件名	内視鏡洗浄機 ONW-10

拝啓

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨日はお忙しい中ありがとうございました。

作業にあたり機械について説明不足な点がありましたので
下記連絡いたします。誠に恐縮ですがスタッフの皆様に添付の書類をお渡し
くださいますよう、よろしくお願いいたします。

敬具

—記—

フィルタのお手入れ時期をお知らせする機能を追加しました。


- ① 12回運転するとフィルターランプが点滅します。
(添付書類1をご参照ください)
↓
- ② フィルターを取り出してゴミが無いかチェックしてください。
↓
- ③ フィルターを取り付けてください。
↓
- ④ フィルタリセットスイッチを押してください。
(添付書類2をご参照ください)
↓
- ⑤ フィルタランプの点滅が消えます。

ご不明な点がありましたら弊社まで連絡ください。

—以上—

添付書類 1

4) 操作パネル

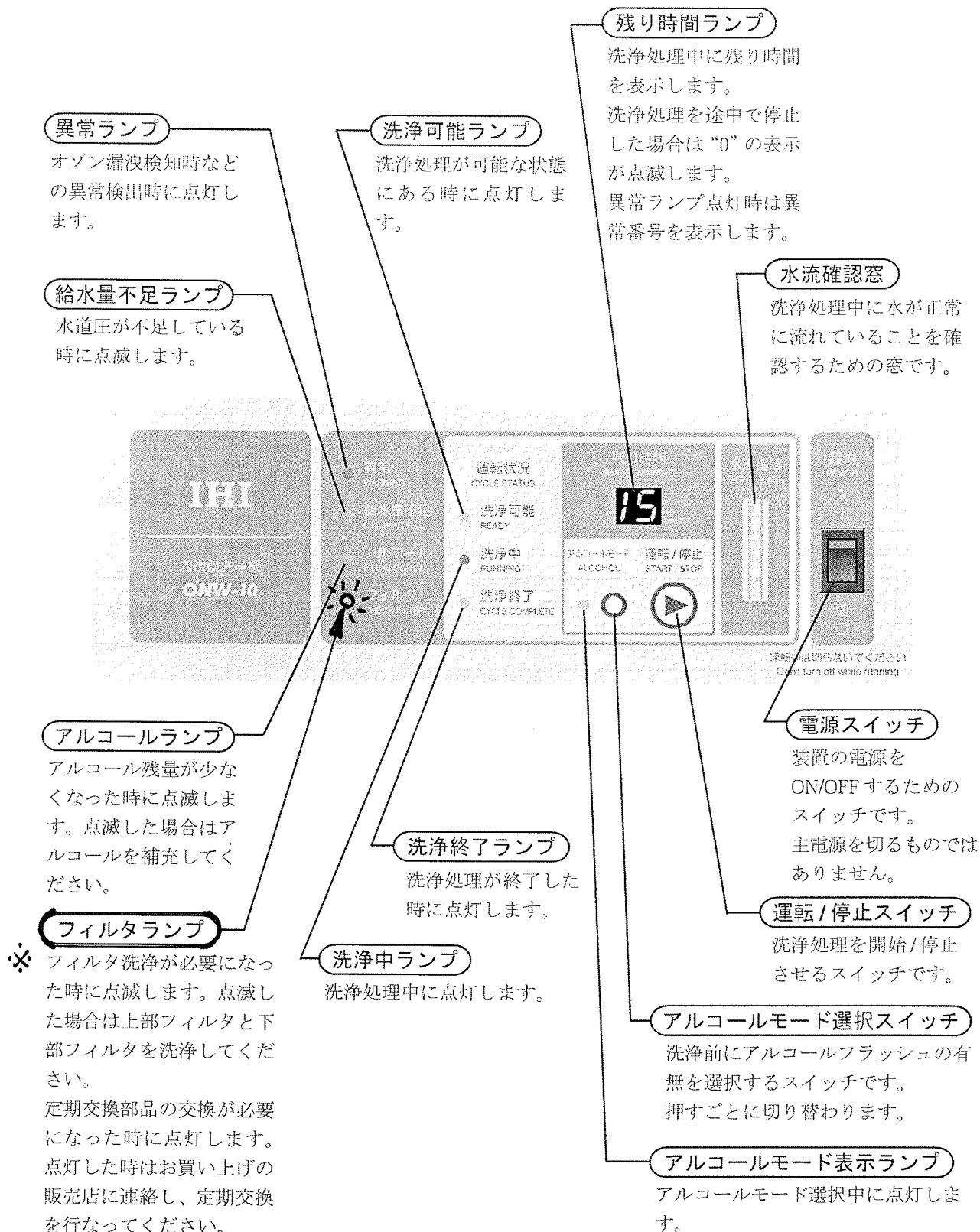


*ランプ表示の詳しい説明は、「ランプ表示一覧」(30ページ参照)をご覧ください。

※ 12回 回転すると点滅します。

※ 1500回 回転すると点灯します。(販売店にお知らせ下さい)

5 各部の名称と機能

1) 前面

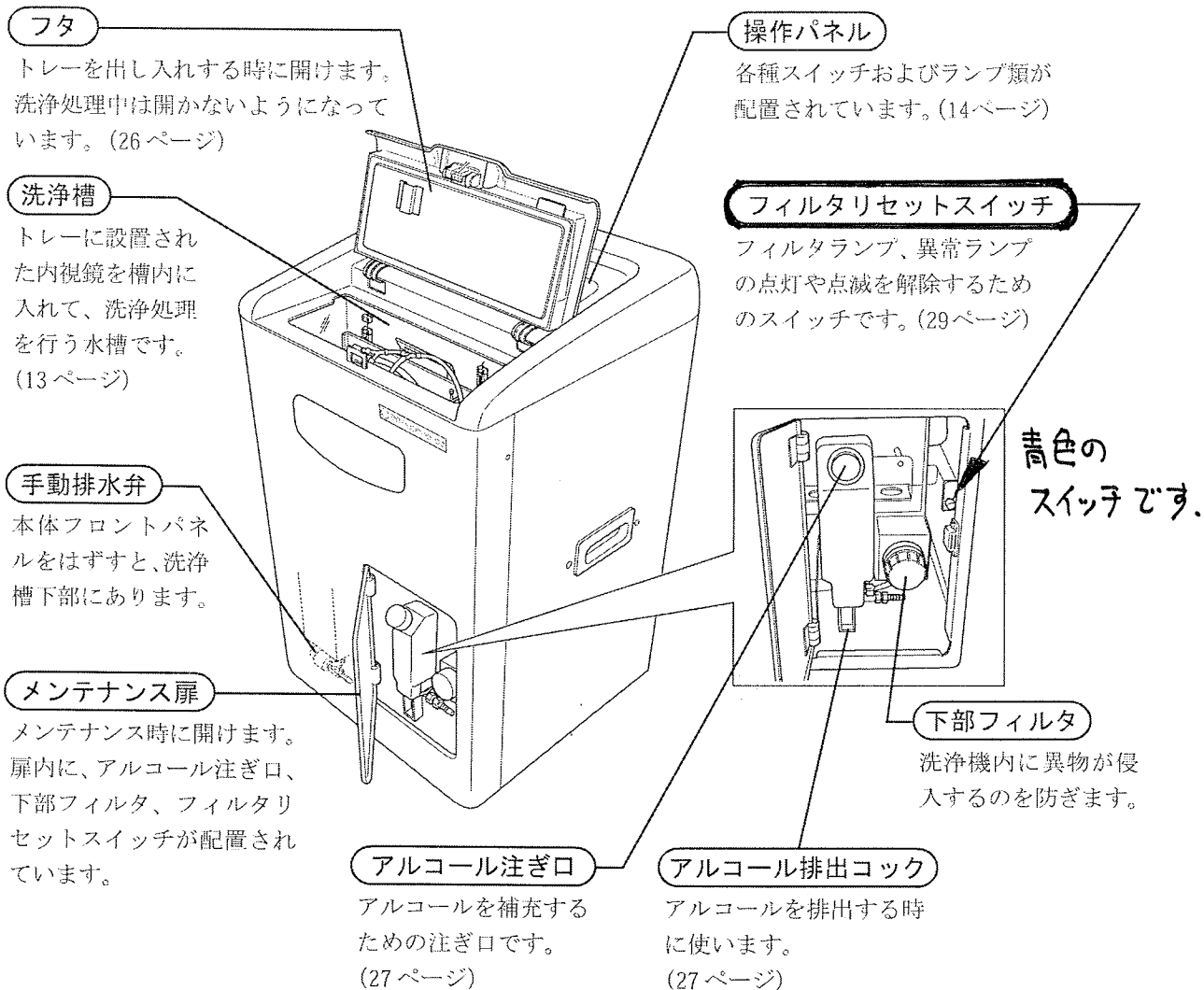

●下部フィルタの使用方法について

下記の点にご注意ください。水漏れの原因となります。

フィルタを洗浄する際は、キャップ及び装置本体に付着しているごみも拭き取ってください。

フィルタを元に戻す際には、図のように確実に奥まで挿入してください。

