

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 091201

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	埼玉県さいたま市南区南浦和 3-17-2		機番	000331
環営	ユーザー名	山田整形外科・胃腸科・肛門科 様		納入日	平成16年 5月
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成21年 9月 28日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成21年 12月 1日
計	3				

修理依頼・苦情内容

異音発生

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

3台搭載している水ポンプのどれかが音を発生させたと思われます。
これを全て交換しました。（P-1は現地交換済み）
併せて定期部品の交換と性能確認、
内部清掃を実施しました。



[2] 修理・点検内容

- 部品交換（下表及び右写真参照）
- 給水ストレーナ、排気ホース、レベルセンサ、フタ清掃
- オゾン水濃度測定：0.42～0.55mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：95.7% 酸素流量：0.74L/min 圧力：0.094～0.162Mpa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常。オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認				
江 21.12-1 口				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
江 21.12-1 口		水ポンプ	3	1台は現地交換済み
		オゾンセンサー	1	
作成		吸着筒、吸湿筒	1式	SPS-10169
		オゾン分解触媒	1	
H21.12.1 中澤		ドレンフィルター	1	