

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 100725

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	千葉県柏市北柏 3-2-6 ロイヤルビル北柏 2F	機番	000139
環営	ユーザー名	北柏胃腸科外科 様 （総合メンテナンス契約）	納入日	平成15年6月20日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	平成22年5月27日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成22年7月26日


修理依頼・苦情内容

エラーH（排水異常）、電源リセットしたらエラー4（水位レベルセンサ異常）発生。
新鋭工業殿が現地にて確認したが、異常は再現しなかった。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水ポンプと水位レベルセンサの劣化が考えられますので、これらの部品を交換しました。

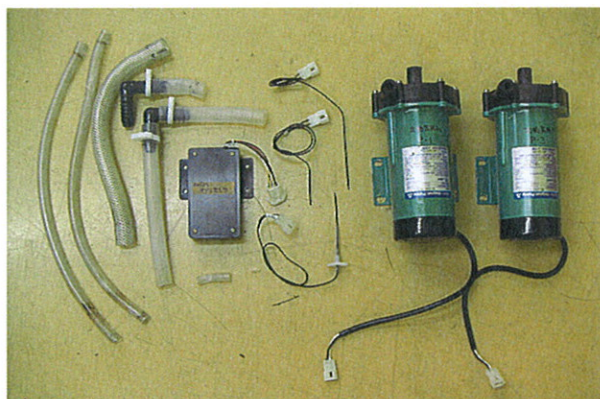

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- 総合メンテナンス契約に伴う点検、清掃作業
- オゾン水濃度測定：0.47～0.54mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.7% 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.099～0.164MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ（P-1、P-3）	2	
	水位レベルセンサ（LVL、LVH1、LVH2）	3	
	水ポンプ吸込み側チューブ	2	
	排水ポンプ吐出側チューブ	1	
	アスピレータチューブ	3	長 X2、短 X1
	オゾンセンサ	1	

承認



審査



作成

H22.7.27

中澤