

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 100818

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	千葉県袖ヶ浦市奈良輪 1-8-8		機番	001206
環営	ユーザー名	袖ヶ浦医院		納入日	
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成22年8月6日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成22年8月17日

修理依頼・苦情内容

内部点検および新型PSA（酸素発生装置）対応

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

新型PSA対応につきまして

オゾンガスの生成に必要な酸素ガスをPSA（酸素発生装置）で発生させています。

このPSAの性能と耐久性を向上させたものに交換しました。

大きな変更点は、2時間の再生運転（セルフクリーニングモード）が不要になりました。
PSAの性能再生のために従来は洗浄が終了しても電源スイッチを切らないようお願い
していましたが、今後は洗浄終了後に電源スイッチを切ることができます。

従来のPSA：洗浄終了⇒2時間再生運転を続行した後自動停止

新型PSA：洗浄終了⇒電源スイッチを「切」にして停止

* 2時間後に自動停止はしませんのでご注意ください。

* その他の変更点は別紙をご参照ください。

〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表をご参照ください。

2. 内部清掃および排水ポンプ内の異物除去（手袋の破片）

3. オゾン水濃度測定：0.48～0.56mg/L・・・正常

4. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：95.2% 酸素流量：0.8L/min 圧力：0.085～0.147MPa

5. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
江 22.8.18 口		新型PSA	1	SPS-10249
審査		フタパッキン	1	
江 22.8.18 口				
作成				
H22.8.18				
中澤				