

点検報告書（引取り点検）

修理依頼
番号

No. 091001

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	東京都武蔵野市吉祥寺東町2-17-2			機 番	000197
環営	1						
防品	1						
		ユーザ名	松井クリニック 様			納 入 日	平成15年9月29日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成21年7月 2日
計	3	返 送 先	営本			出 荷 日	平成21年 9 月 30 日

修理依頼・苦情内容

総合点検

（総合メンテナンスご契約ユーザー）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 作業内容

・定期交換部品および主要部品を交換しました。
（交換部品は下表、写真参照）

・機械内部、外部を清掃しました。



[2] 修理・点検内容

1. オゾン水濃度測定：0.42～0.55mg/L・・・正常

2. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：95.7% 酸素流量：0.73L/min 圧力：0.086～0.164Mpa（AC100V、50Hz）

3. 運転動作確認・・・正常。オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
作成		水ポンプ	3	
		エアコンプレッサー	1	性能劣化
		オゾンセンサー	1	
		蓋パッキン	1	
H21.10.1 中澤		排水シリコンチューブ	1	
		定期交換部品KIT	1	吸着 吸湿 触媒 フィル