

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 100528

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	ムラタ胃腸クリニック 様		機番	100107
環営	所在地	東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-11-12 キャノンプラザ 6F		納入日	平成 22 年 5 月 10 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 22 年 5 月 20 日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 22 年 5 月 29 日
計	3				

修理依頼・不具合内容

5/18 15:46 排水異常 2 (E:402)
機械引き上げ時も排水しないことを確認した。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

排水異常は再現せず、排水配管系統も詰まりはありませんでした。
不具合の状況から電気配線のコネクタの接触不良が考えられ、配線系統を全て点検し、排水ポンプ(写真1参照)を交換しました。

写真1:排水ポンプ


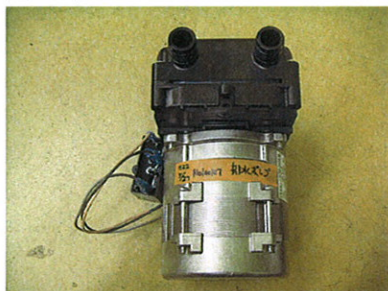


写真2:コントロール基板

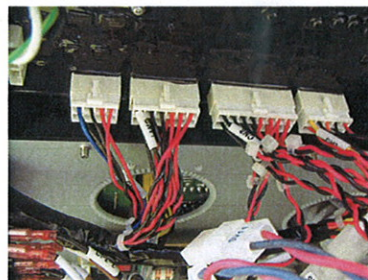

[2] 修理・点検内容

- 1:コントロール基板～リレー基板～水位センサー～排水ポンプ配線チェック（写真2参照）
- 2:オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）: 0.74ppm・・正常
- 3:運転確認・・正常
- 4:出荷時の装置情報

交換後運転回数: 23 殺菌: 8、殺菌+アルコール: 15、リークチェック: 12

自己洗浄: 14、アルコール単独: 0、エア単独: 1

—以上—

交換部品

承認
江 22.5.28 口
審査
江 22.5.28 口
作成
H21.5.28 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考
	自吸ポンプ ASSY	1	排水ポンプ

(株) IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528