

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 111201

納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿			機種	ONW-10
所在地	東京都三鷹市上連雀5-23-10			機番	000185
ユーザー名	三鷹中央病院 様			納入日	平成15年10月17日
点検者	中澤一裕	作業時間	4.0Hr	受付日	平成23年6月14日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成23年12月2日

修理依頼・異常内容

- ・漏電ブレーカ切れ（ブレーカトリップ）
- ・定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械内部の電気部品に水が掛かった形跡があり、これが原因で漏電ブレーカがトリップしたものと推察されます。（写真をご参照ください）
水漏れ箇所の対策を実施し、蛍光灯は一式交換しました。

写真1：蛍光灯ASSY

（原因）水槽とカバーの隙間から水が漏れた
（対策）隙間にシール剤を充填


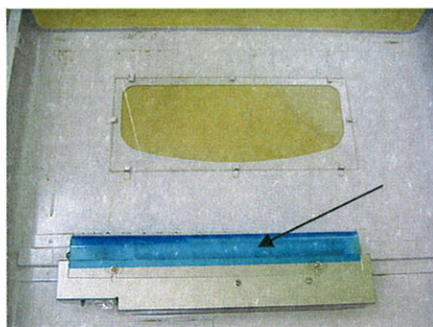


写真2：電気コネクタ

（原因）大気解放配管より水が溢れた
（対策）配管清掃。コネクタにカバー追加

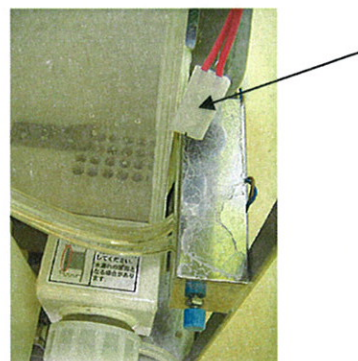

[2] 修理・点検内容

1. 漏電不具合修理および対策
2. 絶縁抵抗測定：電源コード及び機械本体2000MΩ以上・・・正常
3. 定期点検および部品交換
4. オゾン水濃度測定：0.6 mg/L・・・正常
5. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：95.0% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.074~0.130MPa
6. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	定期交換部品 PSA：吸着筒、吸湿筒 ドレンフィルター、オゾン分解触媒	1式	
	オゾンセンサー	1個	今回無償
	蛍光灯ASSY（ランプASSY）	1式	蛍光灯、グロー球含む

承認



審査



作成

H23.12.2
中澤