

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 100725

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	東京都杉並区西荻北3-45-9	機番	000242
環営	ユーザー名	大沼田メディカルクリニック 様（総合メンテ契約）	納入日	平成15年12月5日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	平成22年2月8日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成22年7月27日


修理依頼・苦情内容

エラー9（洗浄中水位高）
総合メンテナンス2年目1回目作業

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

修理と検証に時間が掛かり、大変申し訳ありませんでした。
排水ポンプの性能劣化がエラー9の原因で、運転中の給水と排水のバランスがくずれて
水槽の液面が規定より上がり、これを水位センサ（LVH1）が異常検知しました。

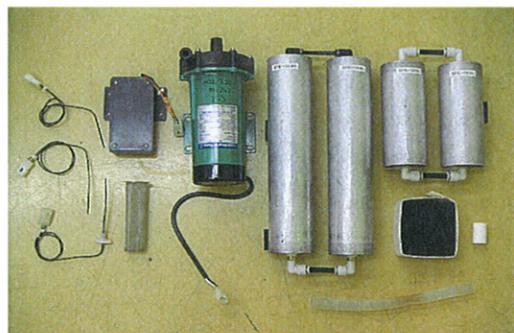

[2] 修理・点検内容

- 総合メンテナンス契約に伴い定期部品も交換しました。（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.47～0.61mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：95.1% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.095～0.156MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
江 22.7.27 口		排水ポンプ（P-3）	1	エラー9復旧用
江 22.7.27 口		水位レベルセンサ（LVL、LVH1、LVH2）	1	エラー9復旧用
作成		下部フィルタ、オゾンセンサ	1	劣化のため交換
H22.7.27		吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ	1式	定期交換部品
中澤		オゾン分解触媒、排水バルブ用チューブ	1式	定期交換部品