

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 100723

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	神奈川県相模原市緑区橋本 3-15-4	機番	000231
環営	ユーザー名	岡部クリニック 様 （総合メンテナンス契約）	納入日	平成 15 年 12 月 22 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日
				平成 22 年 1 月 22 日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 22 年 7 月 21 日

修理依頼・苦情内容

異音がする。（ピーという音でかなり大きい音がする）

経緯：平成 21 年 10 月 20 日

新鋭工業殿が異音の発生原因と思われる水ポンプ（P-1、P-2、P-3）を交換した。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

修理に時間が掛かり、大変申し訳ありませんでした。

お預かりしている間運転条件を振って確認しましたが異音は再現しませんでした。

そこで再度水ポンプを全部交換し、エアコンプレッサーに防振ゴムを追加しましたので様子を見てくださいますよう、お願いいたします。



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- 総合メンテナンス契約に伴う点検、清掃作業
- オゾン水濃度測定：0.45～0.63mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：95.0% 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.101～0.182MPa

- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3	
	下部フィルター	1	
	水ポンプ吸込み側チューブ	2	