

前澤クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者： 渡 辺

点検年月日	平成23年10月21日	機種名	ONW-10	製造機番	51
設置場所	東京都武蔵野市境南町3-15-21			Tel:	042-230-2861
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールブッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度 91.2%	流量 78 L/min 圧力 91~168 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	

年 月 日

ご署名 

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

日 付: 2011.10.21 作業者

ONW-10機番: 51 PSA機番: SPS-10 466 客先: 前澤ケニツク 様

定期交換部品		
吸着筒と吸溜筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 81)		(合) 否
ドレン用フィルタを交換したか		(合) 否
排水シリコンチューブを交換したか		(合) 否
オゾン分解触媒を交換したか		(合) 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		(合) 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		(合) 否
PSA性能確認		
圧カスイツチのゼロ点はあるか (±0.005Mpa以内)		(合) 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(91.2 %)	(合) 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.78 L/min)	(合) 否
PSAE力の確認	(91 Mpa) ~ (168 Mpa)	(合) 否
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		(合) 否
フロントパネルのラジフは配線したか		(合) 否
フロントパネルとサイドパネルの間隔は均等か		(合) 否
ドレンチューブは接続したか		(合) 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれは無いか		(合) 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		(合) 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れのある場合清掃)		(合) 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		(合) 否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)		(合) 否
別紙 点検確認書に記録したか		(合) 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾンインジケータで0.3mg/L以上)		(合) 否
運転は正常か、エラーはでないか		(合) 否
インジケータの変色は良好か		(合) 否
PSAカウンタ	回	
PSA2hカウンタ	回	
総洗浄回数	回	
定期点検用洗浄カウンタ	回	

不具合内容・特記事項 (否の場合、NOと共に理由を記入)