

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 111128

配布先	客先	納入先	新鋭工業（株） 東京支店 殿	機種	ONW-10
環営	防品	所在地	東京都三鷹市牟礼7-1-24	機番	000165
		ユーザー名	天神前クリニック 様	納入日	平成15年8月22日
		点検者	IHIシバウラ 中澤	受付日	平成22年10月26日
			エムシーサービス（株） 殿		
計	3	返送先	納入先と同じ	発送日	平成23年11月17日

修理依頼・苦情内容

定期点検及び水ポンプ交換

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

性能劣化していた水ポンプと定期部品を交換しました。

交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.5mg/L・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検 ・・正常
酸素濃度：93.3% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.082~0.149MPa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

承認	交換部品			
江 23.11.28 口	部品番号	部品名称	数量	備考
審査		PSA：吸着筒,吸湿筒	1式	SPS-10264
江 23.11.28 口		排水シリコンチューブ	1本	
作成		オゾン分解触媒	1個	
H23. 11. 28		ドレンフィルター	1個	
中澤		水ポンプ（P-1）	1台	オゾン水製造用
		水ポンプ（P-2）	1台	内視鏡洗浄用
		水ポンプ（P-3）	1台	排水用