

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 渡 辺

点検年月日	平成23年11月29日	機種名	ONW-10	製造機番	1064
設置場所	北葛飾郡松伏町松葉1-5-7			TEL:	048-992-0411
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度 91%	流量 1180 L/min 圧力 87~157 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	72個 サイロパネル 次回点検時交換予定 取替り要.
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 月 日

ご署名 小島



印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社 IHI シバウラ

環境事業部

日 付: 2011.11.29 作業者

ONW-10機番: 1064 PSA機番: SPS-10632 客先: 埼玉野村病院 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10179)		合/否
ドレン用フィルターを交換したか		合/否
排水シリコンチューブを交換したか		合/否
オゾン分解触媒を交換したか		合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと		合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか		合/否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点はあるか (±0.005Mpa以内)		合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(91.1 %)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.8 L/min)	合/否
PSA圧力の確認	(27 Mpa) ~ (157 Mpa)	合/否
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか		合/否
フロントパネルのランプは配線したか		合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か		合/否
ドレンチューブは接続したか		合/否
確認事項		
フタパッキンに剥がれは無いか		合/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か		合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか (汚れのある場合清掃)		合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか		合/否
定期点検カウンターをリセットしたか (フィルターリセットスイッチ20秒長押し)		合/否
別紙 点検確認書に記録したか		合/否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾンインジケータで0.3mg/L以上)		合/否
運転は正常か、エラーはでないか		合/否
インジケータの変色は良好か		合/否
PSAカウンタ	回	
PSA2hカウンタ	回	
総洗浄回数	回	
定期点検用洗浄カウンタ	回	

不具合内容・特記事項 (否の場合、NOと共に理由を記入)