

かしのき内科 小児科

ワリコウ 御中

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

左サイドパネル共振音対応

点検担当者: 中澤 裕

|       |                 |      |        |      |                |
|-------|-----------------|------|--------|------|----------------|
| 点検年月日 | 平成 23年 1 月 15 日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | :0003121790    |
| 設置場所  | 1F 内視鏡室         |      |        | TEL  | : 048-770-2211 |
| 設置時期  | 平成 16年 6月 9日    | 運転回数 | 未測定    | 御対応者 |                |

21 3 27

| 点検項目           | 点検結果 |                                             |                                        |                                                      |
|----------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| スイッチ類          |      |                                             |                                        |                                                      |
| 電源釦            | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 交換                                     | <input type="checkbox"/>                             |
| フィルタリセット釦      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 交換                                     | <input type="checkbox"/>                             |
| 運転/停止釦         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 交換                                     | <input type="checkbox"/>                             |
| アルコールモード釦      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 交換                                     | <input type="checkbox"/>                             |
| ランプ類           |      |                                             |                                        |                                                      |
| 操作パネル          | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 交換                                     | <input type="checkbox"/>                             |
| 蛍光灯            | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 交換                                     | <input type="checkbox"/>                             |
| 洗浄動作           |      |                                             |                                        |                                                      |
| フタロック          | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 給水             | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ     | 正常   | <input type="checkbox"/> 未実施                | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 排水             | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> 左サイドパネル | 調整 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/>                          |
| 性能確認           |      |                                             |                                        |                                                      |
| オゾン水濃度         | 正常   | <input type="checkbox"/>                    | 濃度:                                    | mg/L                                                 |
| オゾンインジケータ      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         |                                        |                                                      |
| 酸素発生           | 正常   | <input type="checkbox"/>                    | 濃度:                                    | % 流量: L/min 圧力: MPa                                  |
| 水漏れ確認          |      |                                             |                                        |                                                      |
| 装置外            | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 装置内            | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 清掃             |      |                                             |                                        |                                                      |
| 外装             | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 清掃                                     | <input type="checkbox"/> トレー小物入れ蓋ネジ増設                |
| 内部             | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 清掃                                     | <input type="checkbox"/>                             |
| 洗浄コネクタ FTS 純正品 | 正常   | <input type="checkbox"/>                    | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/>         | 調整                                     | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品       | 数量                          | コメント                                                        |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 吸着筒        | 交換 <input type="checkbox"/> | 共振音につきまして<br>左サイドパネル背板を再度<br>組付けて、音が発生しない<br>ことを確認しました。(無償) |
| 吸湿筒        | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                             |
| ドレン用フィルタ   | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                             |
| 排水シリコンチューブ | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                             |
| オゾン分解触媒    | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                             |

1500回運転するとフィルタ-ランプが点灯して点検時期を

お知らせします。この時は販売店に連絡して下さい。 ご署名 大原 由紀子 印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。